

# Fiche produit

**Rapid Medical**

Tourniquet RATS Med V2

**Prix de vente (TTC): 35,00 CHF**





## Description:

RATS Tourniquet Gen 2 - efficace même pour les membres fins de

Génération 2 Caractéristiques:

6 pouces de plus!

Les RATS. est:

- Facile à apprendre et à utiliser
- Conception simple permettant une utilisation à une main
- Prend un minimum d'espace vous permettant de stocker presque n'importe où
- Fonctionne sur toutes les tailles de membres, à savoir les adultes, les chiens de travail et les enfants
- Prouvé pour être efficace dans l'occlusion du flux sanguin dans le haut et le bas

extrémités de l'Institut de recherche chirurgicale de l'armée américaine

- brevet U.S. breveté N ° 9 168 044

Le noyau interne de la sangle est en latex. Le noyau est cependant constitué d'un caoutchouc vulcanisé à haute teneur en silicone. La possibilité d'une réaction au latex est considérée comme identique à celle d'un pneu d'automobile. Le noyau est complètement enveloppé dans une gaine de protection en polyester, qui agit pour protéger le noyau interne du contact direct avec la peau.

Le tourniquet RAT doit être conservé dans l'emballage en plastique jusqu'à son utilisation. L'appareil doit être correctement éliminé après utilisation. L'inspection de l'appareil doit avoir lieu avant l'utilisation. L'inspection doit consister à rechercher tout effilochage de la gaine, des fissures dans la cale métallique ou toute autre déformation de l'appareil susceptible de compromettre le garrot. Si l'une de ces conditions existe, n'utilisez pas et ne remplacez pas rapidement le garrot.

Lorsqu'il est correctement appliqué, le R.A.T.S. est un dispositif efficace pour contrôler hémorragie menaçant la vie. Consulter un professionnel EMS pour une formation adéquate sur l'utilisation de tout garrot. Ne pas appliquer sur des objets solides. Lire toutes les directions et comprendre l'utilisation appropriée avant toute tentative de rendre l'aide. Si utilisé en raison d'un traumatisme, rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche.

## Photos complémentaires:



## Tableau d'options:

Couleur Rapid Med

Rouge , Noir , Orange , Hi-Vis Jaune